

DONJOY®

DONJOY®

Surround® Gel Ankle

- EN-**Compressive, stabilizing support with cold therapy option, for sprains, strains, tender or swollen ankles
- FR-**Attelle compressive et stabilisatrice avec cryothérapie optionnelle pour œdèmes, lésions, ou entorses de cheville de gravité moyenne
- ES-**Soporte compresivo y estabilizador, con opción de terapia de frío, para torceduras, esguinces y tobillos sensibles e hinchados
- IT-**Comprensione, supporto e stabilizzazione con terapia del freddo in caso di necessità. Indicata per distorsione, trauma, debolezza o gonfiore alla caviglia
- DE-**Kompression, Stabilisation und Unterstützung mit Kältherapie bei Sprunggelenksdistorsionen und anderen Verletzungen mit geschwellenem Sprunggelenk
- NL-**Koude compressietherapie biedt stevige steun bij ernstige enkelletsels en behandeling van gevoelige of gezwollen enkels

Cold therapy gel pads help reduce swelling

- Les coussinets en gel peuvent être utilisés en cryothérapie pour aider à réduire l'œdème
- Las almohadillas de gel para terapia de frío ayudan a reducir la inflamación
- I cuscinetti con gel per la terapia del freddo riducono il gonfiore
- Kühlende Gelpads unterstützen den Schwellungsabbau
- Gelvoering voor koudtherapie vermindert zwellung

Semi-rigid shells help minimize ankle rotation

- Les coques semi-rigides minimisent la rotation de la cheville
- Las valvas semirígidas ayudan a minimizar la rotación del tobillo
- Le valve semi-rigide aiutano a ridurre la rotazione della caviglia
- Halstarre Schalen minimieren die Sprunggelenkrotation
- Semi-rigide schelpen minimaliseren enkelrotatie

Comfortable in athletic or street shoes

- Confortable dans une chaussure de sport ou de ville
- Confortable en zapato deportivo o cotidiano
- Confortevoli con scarpe sportive o normali calzature
- Optimal in sport- oder Straßenschuhen zu tragen
- Past comfortabel in sport- en vrijetijdsschoenen

Heel strap for easy adjustment and proper fit

- Sangle talonnière pour faciliter l'application et un ajustement optimal
- Cinta de talón para un ajuste fácil y adecuado
- Supporto al tallone per un facile e perfetto indosso
- Fersensteg für einfache Einstellung und gute Passform
- Hielband die gemakkelijk verstelbaar is en een perfecte pasvorm garandeert



DONJOY®

Surround® Gel Ankle

- EN-**Ankle stirrup with gel liners
- FR-**Attelle de cheville avec coussinets en gel
- ES-**Estabilizador de tobillo con almohadillas de gel
- IT-**Tutore per caviglia con cuscinetti interni con gel
- DE-**Sprunggelenkorthese mit Gelkissen
- NL-**Enkelbandage met gelvoering

Size	Talla	Height	Altezza
Größe	Taglia	Hauteur	Höhe
Taille	Maat	Altura	Hoogte
Small		21.5 cm	8.5"
Athletic		22.5 cm	9"
Standard		25 cm	10"

Fits left or right

- Modèle bilatéral
- Ambidestro
- Ambidestro
- Passt links oder rechts
- Past links en rechts

Contains one support

- Contient une attelle
- Contiene una ortesi
- Contiene un tutore
- Enthält eine Orthese
- Bevat één brace

DONJOY®

Surround® Gel Ankle



DONJOY®

Surround® Gel Ankle

13-2984 REV H - 2020-10-16 © 2020 DJO, LLC

DONJOY
Dimns. 4.125" X 3" X 13"