

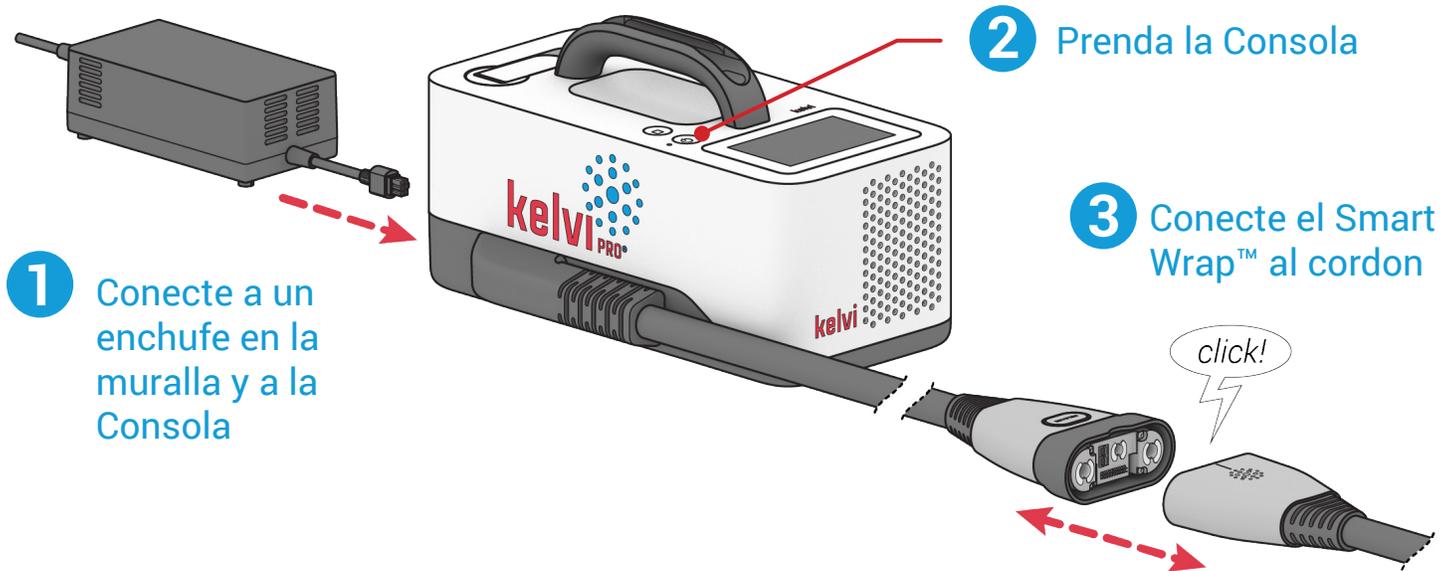
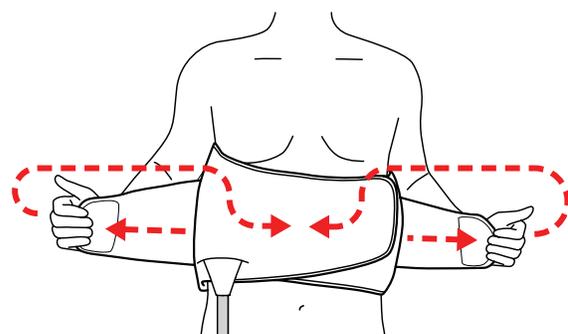


Configuración de la Consola Kelvi Pro^e

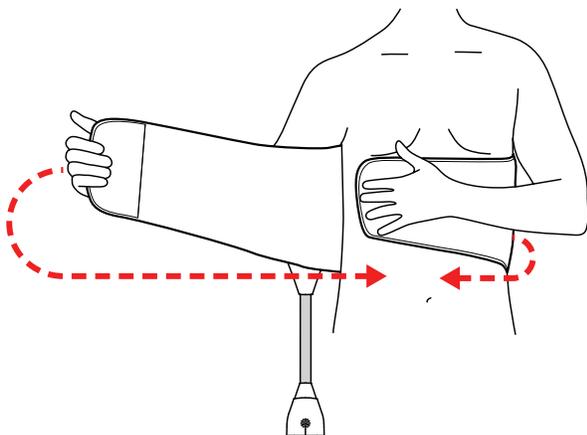

Como Ponerse el Smart Wrap™


5 Ajuste el tamaño del Smart Wrap™ a su cuerpo doblando los tirantes principales para reducir su longitud

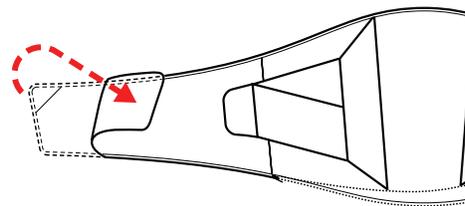

6 Ponga el Smart Wrap™ centrado en la parte baja de su espalda y estire los tirantes principales para asegurar el que esté bien ajustado alrededor de la cintura.

7 Ajuste los tirantes secundarios para lograr que el Smart Wrap se sienta cómodo y bien ajustado.


Preparar un Tratamiento*

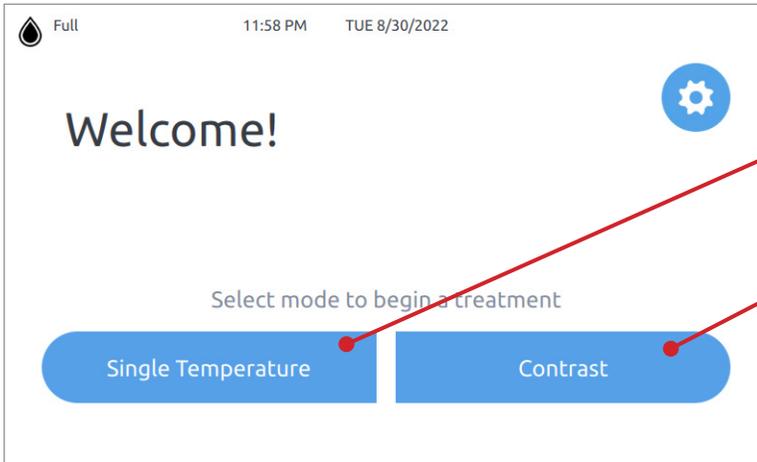

7 Seleccione el tipo de tratamiento

En la pantalla, seleccione **Single Temperature** para un tratamiento a temperatura constante.

Seleccione **Contrast** para un tratamiento alternando frío and calor.

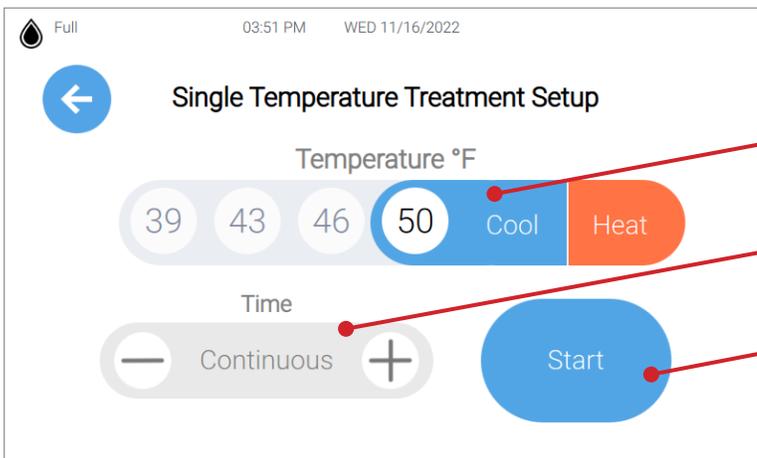


8 Seleccione temperatura y duración del tratamiento

Presione **Cool** o **Heat**, después seleccione temperatura y duración del tratamiento.

Ponga un límite de tiempo o elija **Continuous**.

Presione **Start** para iniciar el tratamiento.

Durante el tratamiento, el Smart Wrap™ puede ser ajustado de acuerdo con la necesidad y el confort.

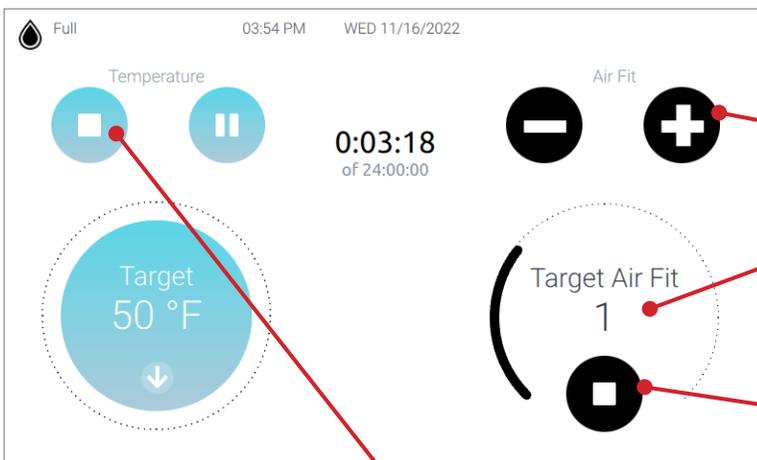

9 Cambie la presión de aire para ajustar el Smart Wrap™

Seleccione **+** o **-** para cambiar la presión de aire.

Parta en nivel 1 e incremente la presión en incrementos unitarios. No sobrepase la presión de aire más allá de donde se sienta cómodo.

Presione **Stop** para eliminar la presión de aire.

Presione **Stop** para terminar con el tratamiento.

* Siga la prescripción del médico para el tratamiento



Escanee aquí para las instrucciones de uso completas



IMPORTANTE: Lea la instrucciones completas, incluyendo indicaciones, contraindicaciones, precauciones, y advertencias antes de usar este producto. Para obtener ayuda sobre el uso del sistema Kelvi Pro™, comuníquese con su profesional médico o especialista licenciado en salud.

