

Aircast® AirSelect™ Standard Información del paciente

(01EF-XS, 01EF-S, 01EF-M, 01EF-L, 01EF-XL)

Aircast® AirSelect™ Standard

AirSelect™ Standard:

- Para nivel moderado de apoyo.
- Diseñado específicamente para ayudar a las fracturas estables de la parte inferior de la pierna, el pie y el tobillo; Torcedura severa de tobillo; y uso postoperatorio.
- Dos celdas de aire distales.

Información de USO

Para aumentar la comodidad puede usar una media o stockinette, **NO INCLUIDO**.
Consulte el manual de instrucciones para advertencias y precauciones.


Preparación de bota Airselect

- Desabroche las correas
- Retire el panel frontal.
- Abra el forro.

1


Aplicar bota para caminar

- Sentado, coloque el pie en el apoyo.
- Acomode el talón hasta la parte trasera de la abrazadera.
- Vuelva a colocar el panel frontal.

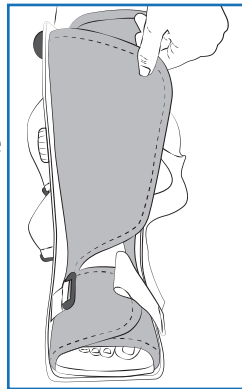

2



- Posicione el panel frontal de manera que el logo de Aircast quede orientado sobre los dedos de los pies.
- Asegure las correas de abajo hacia arriba.
- Apriete hasta que quede ajustado y cómodo.

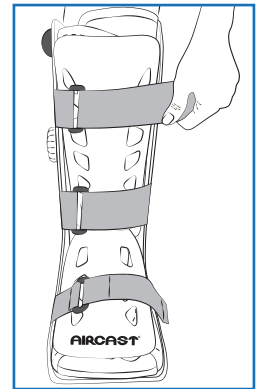

Ajustar la compresión de la celda de aire

Las celdas de aire STANDARD de apoyo para caminar están inicialmente desinfladas.


- Comience el inflado de la celda de aire en el lado lesionado. Gire el SELECTOR que se encuentra en el lado derecho de la abrazadera al número apropiado. El número 1 infla la celda de aire en el lado derecho y el número 2 infla la celda de aire en el lado izquierdo.
- Para inflar las celdas de aire, presione y Bombee la bomba de inflado GRANDE, que se encuentra en la parte superior derecha de la correa. Bombee hasta que la celda de aire se sienta ajustada.
- Repita para inflar otra celda de aire. Cuando se inflan ambas celdas de aire, gire el SELECTOR a la posición de "bloqueo/cerrado" indicada por el logo de candado.

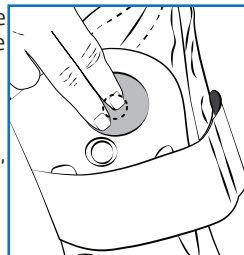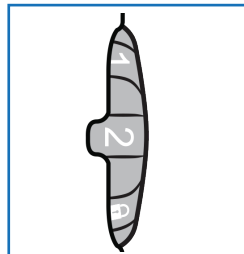

3

Desinflar las celdas de aire

- Para desinflar las celdas de aire, gire el SELECTOR al número de celda de aire apropiado.
- Presione y mantenga presionado el botón de liberación PEQUEÑO que se encuentra en la parte superior derecha de la correa.
- Desinflar hasta que la posterior de la bota.

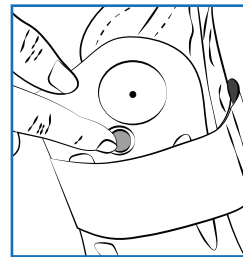

4

NOTA:

Desinfla las celdas de aire antes de quitar la correa para un ajuste correcto para cuando vaya a re-usar.

• Una mayor presión proporciona más apoyo al caminar, menor presión es más cómoda al sentarse o reclinarse. La presión También se puede ajustar apretando o aflojando las correas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

El forro protector se puede lavar a mano en agua a 86 ° F / 30 ° C con un detergente suave y secar al aire. No lo ponga en la secadora ni use otra fuente de calor para secarse.

COMPONENTES MATERIALES

Bota Polipropileno
Panel Frontal: Polietileno de alta densidad.
Correas: Nylon
Bombas de inflado: Termoplastico poliuretano.
Forro Poliuretano/poliéster Foam externo/malla interna)
Correas: Poliéster
Suela exterior / Plantilla: EVA/ caucho sintético
Dial Selector: Nylon
No fabricado con látex de caucho natural.

PATENTED

DJO, LLC.

1430 Decision Street
Vista, CA 92081-8553 U.S.A.
djoglobal.com/aircast



Copyright © 2019 by DJO, LLC

Los resultados individuales pueden variar. Ni DJO Global, Inc. ni ninguna de sus subsidiarias ofrecen consejos médicos. El contenido de este folleto no constituye asesoramiento médico, legal o de cualquier otro tipo. Consulte a su profesional de la salud para obtener información sobre los cursos de tratamiento, si corresponde, que puedan ser adecuados para usted.

MKTIS00-8762 Rev A